


# ピロニック®で尿素呼気試験をお受けになる方へ

## 標準的な<sup>13</sup>C-尿素呼気試験法

赤  
外  
分  
光  
法

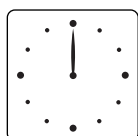

0分

吹く



ピロニック服用前に呼気を採取します。

飲む




ピロニック錠100mg(1錠)を、水約50mLとともに空腹時に服用します。ただし、錠剤をつぶしたり、口腔内で噛み砕いたり、水に溶解したりせず、そのまま速やかに服用します。

直ちに  
うがい  
する



服用後直ちに口腔内を水で2~3回うがいをして吐き出し、口腔内に残存する尿素(<sup>13</sup>C)を排除します。

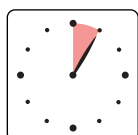


5分

左側臥位  
で待つ




洗浄後、5分間左側臥位の姿勢を保ちます。  
(体の左側を下にして横になります。)

座位で  
待つ

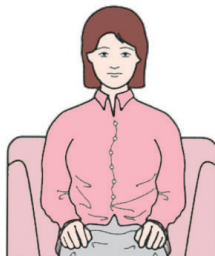


その後、10分間座位の姿勢を保ちます。

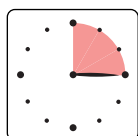

15分

吹く

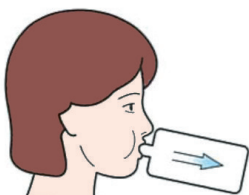

ピロニック服用15分後にもう一度呼気を採取します。