


ピロニック®で尿素呼気試験をお受けになる方へ


標準的な¹³C-尿素呼気試験法

質量分析法

吹く

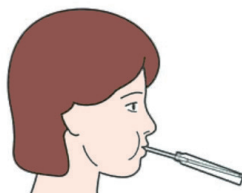

ピロニック服用前に呼気を採取します。

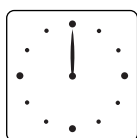


0分

飲む




ピロニック錠100mg(1錠)を、水約50mLとともに空腹時に服用します。ただし、錠剤をつぶしたり、口腔内で噛み砕いたり、水に溶解したりせず、そのまま速やかに服用します。

直ちに
うがい
する

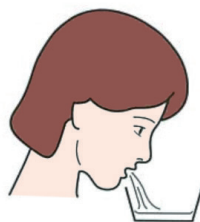

服用後直ちに口腔内を水で2~3回うがいをして吐き出し、口腔内に残存する尿素(¹³C)を排除します。

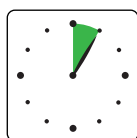


5分

左側臥位
で待つ




洗浄後、5分間左側臥位の姿勢を保ちます。
(体の左側を下にして横になります。)

座位で
待つ

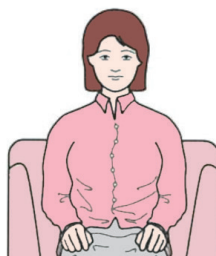


その後、5分間座位の姿勢を保ちます。

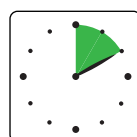

10分

吹く

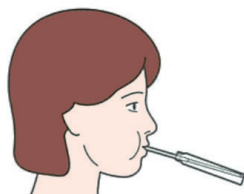

ピロニック服用10分後にもう一度呼気を採取します。